

Інструкція з використання профілактичного порошку PT-S2 (Сода для Air Flow Super)

1 Опис продукту

Профілактичний порошок використовується зі стоматологічними повітряно-абразивними пристроями.

2 Модель

PT-S2

3 Основний склад

Еритритол, аморфний діоксид кремнію, цетилпіридинію хлорид.

4 Показання для застосування

Профілактичний порошок призначений для використання в стоматології з повітряно-абразивними пристроями для видалення зубного нальоту, зубного каменю тощо. (Порошок із розміром частинок приблизно 65 мкм може використовуватися лише для над'ясенного застосування).

5 Спосіб застосування

5.1 Перед відкриванням кришки струсність флакон, виконуючи рухи вгору-вниз 3-5 разів.

5.2 Відкрийте кришку та засипте необхідну кількість порошку у резервуар повітряно-абразивного пристрою відповідно до стану порожнини рота пацієнта, після чого щільно закрийте кришку.

5.3 Увімкніть повітряно-абразивний пристрій та спрямуйте форсунку наконечника на ділянку, що потребує обробки, щоб розпочати чищення.

6 Протипоказання

6.1 Пацієнтам із інфекціями верхніх дихальних шляхів, хронічним бронхітом або астмою за жодних обставин не слід проводити обробку за допомогою повітряно-абразивного пристрою.

6.2 Аерозольна суміш повітря та порошку може спричинити ускладнення дихання.

6.3 У схильних осіб можлива підвищена чутливість до цетилпіридинію хлориду. У разі виникнення алергічних реакцій припиніть використання продукту та повністю видаліть порошок із порожнини рота.

6.4 Обробка глибоких пародонтальних кишень може спричинити бактеріємію. Застосовуйте відповідні обмеження при лікуванні пацієнтів групи ризику (ендокардит, вагітність, годування груддю, інфекційні захворювання, імунodefіцит (нейтропенія, агранулоцитоз, діабет, гемофілія), пацієнти, які проходять лікування (променева терапія, хіміотерапія, антибіотики)).

6.5 Не спрямовуйте струмінь порошку на реставрації, коронки або мосто-подібні протези, оскільки це може їх пошкодити.

6.6 Заборонено застосовувати порошок із розміром частинок приблизно 65 мкм для під'ясенного застосування.

7 Зберігання та термін придатності

7.1 Порошок не слід зберігати поблизу джерел тепла.

7.2 Умови зберігання: зберігати при кімнатній температурі в сухому та захищеному від світла місці.

7.3 Термін придатності: два (2) роки з дати виробництва.

7.4 Не використовувати після закінчення терміну придатності.

8 Поради щодо проведення процедури

8.1 Перед початком процедури змастіть губи пацієнта вазеліном.

8.2 Пацієнт і лікар повинні використовувати захисні окуляри під час процедури.

8.3 Користувач повинен використовувати маску під час процедури.

8.4 Використовуйте аспіраційний наконечник (слиновідсмоктувач) стоматологічної установки для видалення розпорошеного порошку під час процедури.

9 Запобіжні заходи

9.1 Після процедури не висипайте залишки порошку назад у флакон.

9.2 Після відкриття флакона своєчасно закрийте його кришкою та щільно закрутіть, щоб уникнути контакту порошку з вологою.

9.3 Якщо повітряно-абразивний пристрій не використовується протягом тривалого часу, очистіть резервуар для порошку, щоб запобігти його злежуванню та закупорюванню пристрою (форсунок).

10 Транспортування

10.1 Не транспортуйте порошок разом із небезпечними вантажами.

10.2 Під час транспортування уникайте впливу сонця, дощу та снігу.

11 Захист навколишнього середовища

Цей продукт не містить шкідливих інгредієнтів і може бути утилізований відповідно до місцевих норм.

12 Пояснення символів



Виробник



Дата виробництва



Номер партії



Струснути перед використанням



Дотримуйтеся інструкції з використання

13 Заява виробника

Компанія Woodpecker залишає за собою право в будь-який час без попереднього повідомлення змінювати технологію продукту, аксесуари, інструкцію з використання та упаковку.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Віола Медтехніка»,

вул. Героїв-чорнобильців, 15, м. Полтава, 36000, Україна,

тел.: +380532509529



Виробник: Гуйлінь Вудпекер Медікал Інструментс Ко. Лтд.

Адреса: Інформейшн Індастріал Парк, Гуйлінь Нейшенал Хай-Тек Зон, Гуйлінь, 541004 Гуансі, Китайська Народна Республіка

Відділ продажу: +86-773-5873196/2350599

Відділ післяпродажного обслуговування: +86-0773-5827898

Ел. пошта: woodpecker4@glwoodpecker.com

Веб-сайт: <http://www.glwoodpecker.com>

Дата перегляду інструкції: 03.04.2025