

DTE®



Mini Ray Pro

Інтелектуальна система позиціонування сенсора



DTE®



Основні переваги

Точність

Позиціонування датчика для отримання точного знімку з першого разу

Безпека

Екранування з чистого свинцю 99,9% для підвищеного захисту

Чіткість

Високоєфективна рентгенівська трубка для надзвичайно чіткого зображення

Ергономіка

Надзвичайно легка — 2,2 кг — для зручного щоденного використання



Компанія «Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Інформаційний індустріальний парк, Національна зона
високих технологій Гуйлін, Гуйлін, Гуансі, 541004, КНР
Відділ продажів: +86-773-5873196/2350599
Відділ післяпродажного обслуговування: 0773-5827898
Електронна пошта: woodpecker4@glwoodpecker.com
Веб-сайт: <http://www.glwoodpecker.com>

Дилер в Україні: ТОВ Прем'єр-Дентал
<https://premier-dental.com.ua>

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДАТЧИКА

Швидке позиціонування · Точна візуалізація

Вбудована система позиціонування датчика в Mini Ray Pro визначає положення внутрішньоротового датчика в режимі реального часу, допомагаючи налаштувати вирівнювання рентгенівського променя, що забезпечує більш точні та стабільні результати візуалізації.

- Отримання знімка за 10 секунд
- Менше очікування. Менше налаштувань. Менше повторних знімків.
- Більша ефективність для вас. Більший комфорт для вашого пацієнта.



Традиційні рентгенівські знімки

- X Складне керування апаратом
- X Незручні фіксатори для позиціонування
- X Побочування щодо опромінення



Mini Ray Pro

- ✓ Простий у використанні — навіть для початківців
- ✓ Розумна система позиціонування
- ✓ Точність з першого разу



Як користуватися функцією позиціонування датчика



УЛЬТРАЛЕГКИЙ, 2,2 КГ

Ергономіка та портативність

Портативний, збалансований та зручний у використанні — навіть під час щоденного інтенсивного використання

ЗАХИСТ З 99,9% ЧИСТОГО СВИНЦЮ

Підвищена безпека

Рентгенівська трубка та обмежувач пучка мають свинцеве екранування високої чистоти (99,9 %). Витік радіації значно зменшено, що забезпечує безпечніші умови візуалізації як для лікарів, так і для пацієнтів.



99,99%



ВИСОКА ЧУТЛИВІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ КУТА

Більш точний кут зйомки

Для різних положень зубів надаються конкретні значення опорних кутів. Лікарі можуть швидко отримати ідеальний кут, регулюючи пристрій на основі відображення кута в режимі реального часу.

Огляд продукту

Новий Mini Ray Pro впроваджує інтелектуальне позиціонування датчика в портативну стоматологічну рентгенографію, роблячи кожну експозицію простішою, безпечнішою та швидшою.

ВИСОКОПРОДУКТИВНА РЕНТГЕНІВСЬКА ТРУБКА

Чіткіше та різкіше зображення

- Удосконалена фокусна пляма Mini Ray Pro розміром 0,4 мм та ретельно спроектована рентгенівська трубка забезпечують більш сконцентрований промінь, гарантуючи стабільну потужність, безпечніше опромінення та стабільно чіткіше зображення.
- Для лікарів це означає чіткішу діагностику з меншою кількістю невизначеностей.



0,4 мм
Фокусна
пляма

70 кВ
Напруга на
трубці

2 мА
Струм у трубці

БЕЗПРОВІДНЕ
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОЗИЦІЄЮ

Більш безпечно та гнучко

Доступний бездротовий ручний гальмовий пристрій.
Здійснюйте зйомки з безпечної відстані, підвищуючи як гнучкість роботи, так і безпеку пацієнта завдяки зменшенню дози опромінення.



Аксессуары

Бездротове опромінення
ручне гальмо
опція



Експозиція
ручне гальмо
опціонально



Тримач
опціонально

Основа
за
вибором



Зворотне розсіювання
екран
за
бажанням



Технічні характеристики

Напруга та струм у трубці	70 кВ, 2 мА
Розміри (ДхШхВ)	338 мм × 112 мм × 247 мм

Ємність акумулятора	2500 мА·год * 3s
Вага	2,2 кг